


Brugsanvisning for Vitrex Safe Lite:

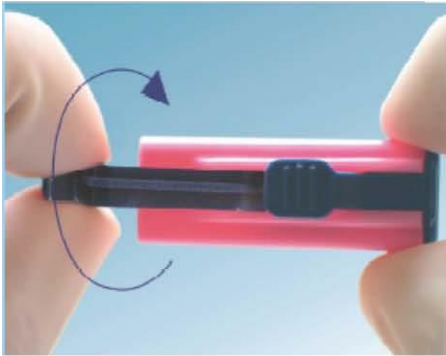

- ✚ Drej beskyttelsesdelen af (Den forhindrer at lancetten bliver udløst i utide).


OBS!! Advarsel – brug den ikke, hvis beskyttelsesdelen allerede er fjernet.



- ✚ Vælg indstikstedet i midten, på siden af fingeren, der, hvor det gør mindst ondt og der er størst mulighed for at få nok blod.
- ✚ Pres engangsfingerprikkeren ind mod siden og tryk på udløseren for at aktivere fingerprikkeren.



- ✚ Bortskaf den brugte engangsfingerprikker i en egnet kanylebøtte.

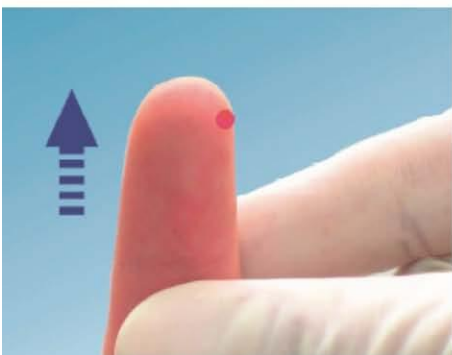

- ✚ "Malk" fingeren i retning mod indstikstedet for at få den ønskede mængde blod.